


Krótką instrukcja użytkowania


Opis

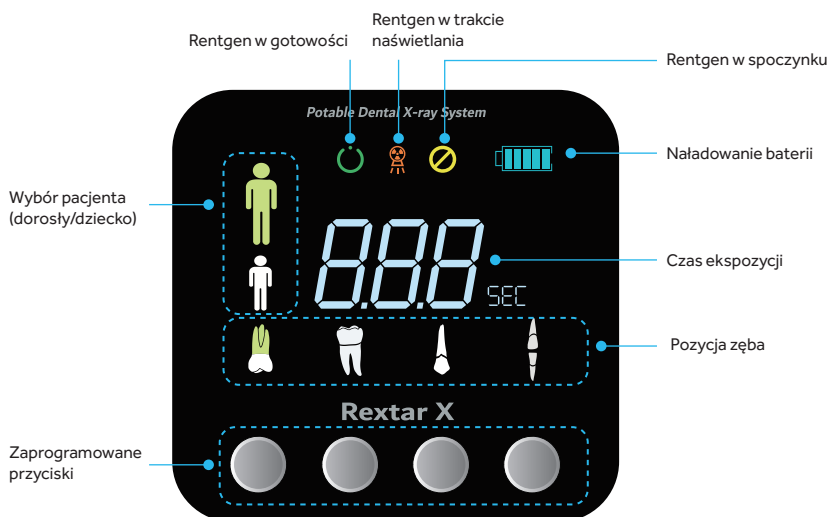

Krótką instrukcja użytkowania

Obsługa


1

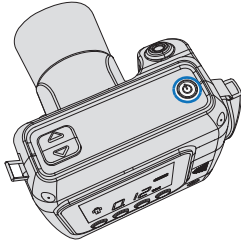

Włączanie

Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sek.

2

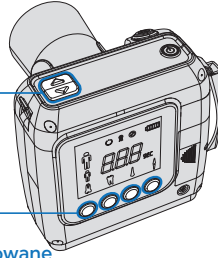


Przyciski
ustawiania
czasu
ekspozycji

Przyciski
zaprogramowane

Ustawianie czasu ekspozycji

Użyj przycisków ustawiania czasu ekspozycji
albo przycisków zaprogramowanych.


3

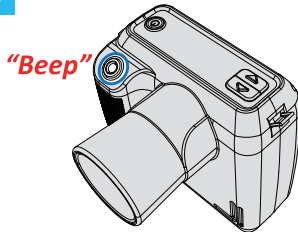

Naświetlanie

Po ustawieniu czujnika/płytki do naświetlania,
naciśnij i przytrzymaj przycisk ekspozycji, aż
usłyszysz dźwięk.

4

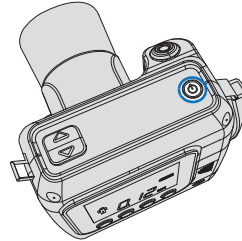


Wyłączanie

Naciśnij przycisk zasilania przez 3
sekundy.



**Jeśli przycisk ekspozycji jest przycisnięty krócej niż
ustawiony czas, błąd "E.09" wyświetli się na ekranie.**

Resetowanie zaprogramowanych przycisków

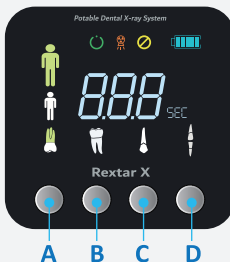

1. Włącz urządzenie
2. Naciśnij zaprogramowany przycisk, który chcesz zresetować, przez 3 sekundy. Ikony wyboru pacjenta i pozycji zęba zaczną migać.
3. Wybierz pacjenta (dorosły/dziecko) naciskając zaprogramowany przycisk "A".
4. Wybierz pozycję zęba, naciskając zaprogramowany przycisk "B" lub "C".
5. Ustaw pożądany czas ekspozycji, naciskając przyciski ustawiania czasu ekspozycji (góra/dół).
6. Zachowaj zmiany naciskając zaprogramowany przycisk "D" do momentu pojawienia się dźwięku.
7. Pozostałe 3 zaprogramowane przyciski (poza wybranym podczas resetowania) zachowują pierwotne ustawienia.